

WYPOSAŻENIE  
PLACÓWEK  
MEDYCZNYCH



adres: Egerton  
ul. Legnicka 21  
41-811 Zabrze  
tel.: 32 728 10 05  
faks: 32 757 91 44  
e-mail: [info@egerton.pl](mailto:info@egerton.pl)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### FOTEL DO DIALIZ I CHEMIOTERAPII DC14S



DATA WYDANIA: 16.06.2016



Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

## Wstęp

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznacznych zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

## Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji



Oznaczenie zgodności



Uwaga!



180 kg Maksymalne obciążenie (waga użytkownika)

## Opis produktu

Diasit to fotel o ergonomicznym kształcie, stabilnej, wygodnej i w pełni regulowanej konstrukcji, zapewniający pacjentowi komfort podczas uciążliwych i zwykle długotrwałych zabiegów. Fotel ma konstrukcję malowaną proszkowo, zabezpieczoną osłoną z tworzywa ABS z powłoką antybakteryjną. Jest wyłożony pianką viscoelastyczną dopasowującą się do ciała pacjenta i tapicerowany wodoodporną i zmywalną ekoskórą.

## Zastosowanie

Fotel jest używany i przystosowany do przeprowadzania chemioterapii, dializ oraz transfuzji. Przeznaczony dla wszystkich oddziałów szpitalnych, placówek i gabinetów wykonujących te zabiegi.

## Dane techniczne

- Pełna regulacja elektryczna wielu funkcji (wysokości, oparcia pleców, podudzia i stóp, pozycji TB/ATB).
- Podłokietniki wyposażone w mechanizm autopozjomujący.
- Przewodowy pilot wyposażony w membranowe przyciski opatrzone czytelnymi piktogramami.
- Podwójne koła blokowane indywidualnie.

| Model                             | DC14S                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Długość                           | 245 cm                                 |
| Szerokość siedziska i oparcia     | 63 cm                                  |
| Szerokość podłokietników          | 20 cm                                  |
| Koła                              | 4 duże podwójne z indywidualną blokadą |
| Regulacja segmentu oparcia pleców | 0°–70°                                 |
| Regulacja segmentu podudzia       | 0°–40°                                 |
| Regulacja wysokości               | 60–80 cm                               |
| Regulacja pozycji TB/ATB          | 13°/5°                                 |
| Maksymalna waga pacjenta          | 180 kg                                 |



## Wyposażenie

- 2 podłokietniki.
- Stojak kroplówki.
- Uchwyt na prześcieradło jednorazowe.



## Przygotowanie do użytkowania



**Uwaga!**

Przed użytkowaniem fotela należy uważnie przeczytać instrukcję.


W celu przygotowania fotela do użytkowania należy postępować według poniższych wytycznych.

1. Upewnij się, że fotel ustawiono na płaskiej powierzchni w pomieszczeniu o temperaturze nieprzekraczającej 45°C.
2. Skontroluj, czy koła są zablokowane, a wszystkie ruchome części ustabilizowane.
3. Sprawdź, czy fotel został wyczyszczony i zdezynfekowany.
4. Upewnij się, że zasilanie w szpitalu jest adekwatne do wymaganego (230 V/50 Hz). Podłącz wtyczkę do gniazdka o zasilaniu 230 V/50 Hz.
5. Sprawdź, czy pilot działa – świadczy o tym świecąca się dioda obok napisu POWER ON.  
Jeżeli dioda się nie świeci, skontroluj przewody i podłączenie do gniazdka. Jeżeli dioda się świeci, wszystkie funkcje są aktywne, a fotel jest gotowy do pracy.
6. Ustaw pozycję wyjściową poprzez naciśnięcie przycisku oznaczonego kolorem niebieskim.  
Przytrzymaj, dopóki fotel nie przyjmie właściwego ustawienia, czyli standardowej pozycji siedzącej.



## Sterowanie

Pilot umożliwia pacjentowi poręczne i szybkie regulowanie ustawień fotela do najwygodniejszej dla niego pozycji bądź do pozycji optymalnej dla przyjmowania leku lub przeprowadzenia zabiegu. Pilotem można regulować wysokość, segment oparcia pleców i podudzia oraz pozycję TB/ATB. Na pilocie znajduje się 8 przycisków i 2 diody LED (alarmowa i informująca o aktywności sprzętu).

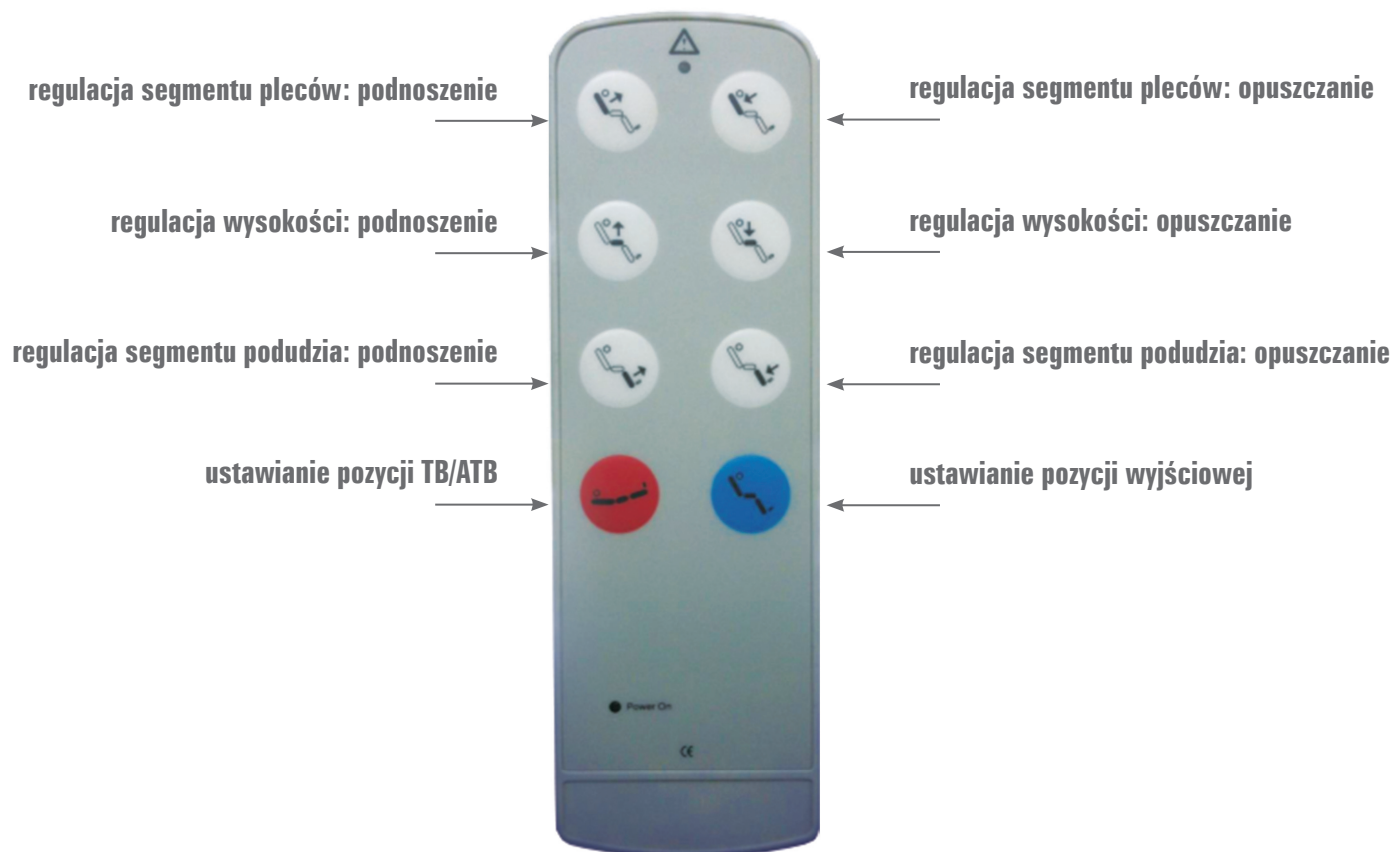



## Środki bezpieczeństwa

- Produkt może być używany tylko przez jedną osobę.
- Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych uszkodzeń.
- Zabrania się użytkowania w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń, gdyż grozi to wypadkiem.
- Obciążenie fotela nie może przekraczać 180 kg.
- Zabrania się używania fotela na wolnym powietrzu, w pojazdach bądź w pomieszczeniach o wysokim ciśnieniu.
- W przypadku pozostawienia fotela w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych istnieje ryzyko nagrzania jego elementów.
- Zabrania się wykonywania napraw na własną rękę. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy.
- Na fotelu nie kłaść przedmiotów ostrych i ciężkich ani płynów mogących zniszczyć pokrycie.
- Fotela nie należy obsługiwać mokrymi rękami.
- Zabrania się stosowania czyszczenia parowego bądź hydrodynamicznego.
- Pilot powinien być utrzymany w czystości.
- Przed przemieszczaniem fotela należy odłączyć go od źródła zasilania.



## Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

## Konserwacja i dezynfekcja



**Uwaga!**

Przed rozpoczęciem czyszczenia i dezynfekcji należy się upewnić, że fotel jest odłączony od źródła zasilania.

Fotel należy przecierać wilgotną (nie mokrą) szmatką za pomocą delikatnych detergentów i dezynfekować atestowanym środkiem dezynfekcyjnym. Do czyszczenia fotela należy używać roztworu łagodnego detergentu (np. mydła, szamponu) w ciepłej wodzie (nieprzekraczającej 60°C). Miejsca bardziej zabrudzone pocierać gąbką. Po wyczyszczeniu przetrzeć powierzchnię miękką szmatką nasączoną wodą w celu usunięcia pozostałości detergentu. Następnie przy użyciu miękkiej szmatki wytrzeć do sucha. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco. Dla zachowania parametrów użytkowych nie należy stosować lub składować fotela w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności (takich jak łaźnie, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu. Fotela nie wolno czyścić parowo ani hydrodynamicznie.

## Środki czystości

Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej.

Środki woskujące nie mają zastosowania i mogą być szkodliwe dla materiału.

Fotel należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest Państwowego Zakładu Higieny.

## Utylizacja

Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.