


WYPOSAŻENIE
PLACÓWEK
MEDYCZNYCH



adres: Egerton
ul. Legnicka 21
41-811 Zabrze
tel.: 32 307 00 98
faks: 32 757 91 44
e-mail: info@egerton.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁÓŻKO BARIATRYCZNE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE FA-5

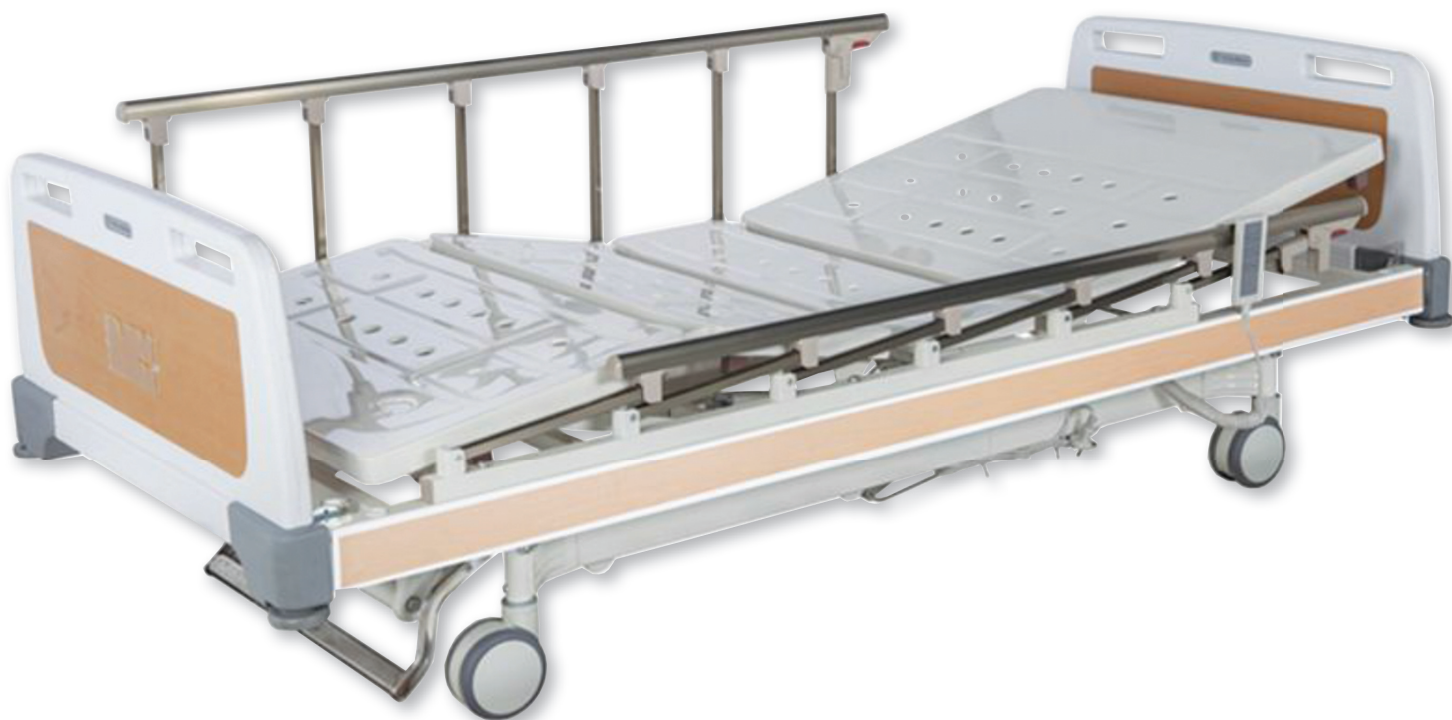

DATA WYDANIA: 15.10.2019



Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

Wstęp

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznacznych zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji



Oznaczenie zgodności



Uwaga!



400 kg

Maksymalne obciążenie (waga użytkownika)



Metody transportu

Opis produktu

Łóżko elektryczne o podwyższonej wytrzymałości konstrukcyjnej i wygodnej tryfunkcyjnej regulacji elektrycznej, wyposażone w szereg rozwiązań, które mają na celu zwiększenie komfortu i dostosowanie ustawień łóżka do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz ułatwienie pracy personelowi medycznemu.

Zastosowanie

Łóżko ogólnoszpitalne stosowane jako wyposażenie oddziałów szpitalnych. Odpowiednie dla niemal każdego oddziału i dostosowane do wszystkich typów wyposażenia sal. Łóżko jest szczególnie polecane dla pacjentów bariatrycznych. Gwarantuje pacjentowi wygodę, pewne podparcie i umożliwia regulację poszczególnych segmentów według aktualnych potrzeb.

Dane techniczne

1. Leże wykonane z perforowanych paneli ABS. Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo.
2. Barierki boczne wykonane ze stopu aluminium, składane wzdłuż ramy leża.
3. Elektryczna regulacja segmentu pleców, nóg oraz wysokości sterowana za pomocą pilota przewodowego.
4. 4 duże koła jezdne z blokadą centralną.

Model	FA-5
Długość całkowita	220 cm
Szerokość całkowita	96 cm
Wysokość regulowana elektrycznie	42–62 cm
Koła	4 duże
Regulacja segmentu oparcia pleców	0°–70°
Regulacja segmentu podudzia	0°–30°
Maksymalna waga pacjenta	400 kg



Wyposażenie

- Barierki składane wzdłuż leża.

Opis montażu

Ze względu na konieczność transportu i zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniem łóżko nie jest całkowicie zmontowane. Należy zamontować poszczególne elementy według podanej instrukcji. Montaż powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowany personel techniczny.

Sprawdź zmontowane łóżko przed wstawieniem go w miejsce przeznaczenia.

Montaż szczytów łóżka

1. Montaż

Unieś zatrzask zabezpieczający. Wsuń szczyt na miejsce. Upewnij się, że kołki znalazły się w odpowiednich otworach. Opuść zatrzask zabezpieczający.


2. Demontaż

Unieś zatrzask zabezpieczający. Wyciągnij szczyt, wysuwając kołki z otworów.



Regulacja ustawień

Sterowanie pilotem

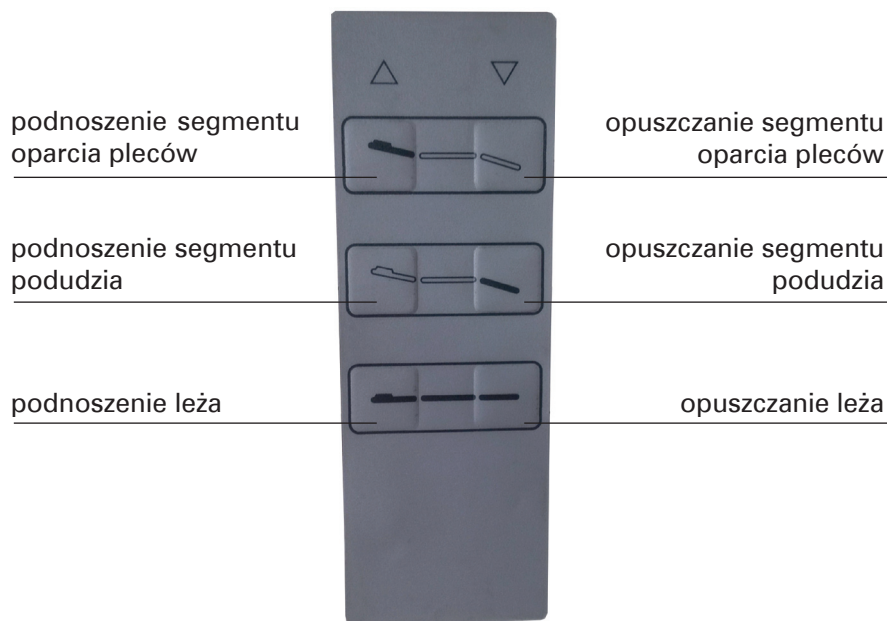

Nie należy naciskać dwóch przycisków jednocześnie, gdyż może to grozić uszkodzeniem systemu elektrycznego.



Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa

- Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych uszkodzeń.
- Zabrania się użytkowania łóżka w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń, gdyż grozi to wypadkiem.
- Zabrania się demontowania elementów czy wykonywania napraw na własną rękę. Serwisowanie oraz wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy.
- Zabrania się wykorzystywania nieautoryzowanych części.

- Nie należy regulować jednocześnie wielu segmentów łóżka.
- Łóżkiem nie może sterować dziecko.
- Nie należy sterować funkcjami łóżka, mając wilgotne lub mokre ręce.
- Zabrania się siadania na segmencie oparcia pleców.
- Zabrania się stawiania na jakiegokolwiek części łóżka.
- W trakcie regulacji funkcji produktu należy zachować ostrożność i trzymać ciało z dala od obszarów, w których mogłoby zostać zakleszczone.
- Przy stosowaniu masek i aparatów tlenowych oraz innego dodatkowego sprzętu należy dokładnie umocować i zabezpieczyć wszelkie rurki i przewody, by nie zostały przygniecione czy uwięzione między elementami łóżka w trakcie jego regulacji.
- Podczas zmiany pozycji łóżka użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami operatora.
- Łóżko musi być ustawione na stabilnym prostym podłożu.
- Na łóżku nie powinno się kłaść żadnych ciężkich bądź ostrych przedmiotów ani substancji żrących lub barwiących, które mogłyby uszkodzić jego powierzchnię.
- W przypadku uszkodzenia łóżka należy natychmiast zaprzestać jego używania i niezwłocznie skontaktować się z dostawcą.
- Dla zachowania parametrów użytkowych nie należy stosować lub składować łóżka w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności, narażonych na działanie gazów korozyjnych czy bezpośrednie nasłonecznienie ani na wolnym powietrzu.
- Łóżko może być użytkowane w temperaturach od 10°C do 50°C, przy wilgotności względnej od 10% do 90% i ciśnieniu atmosferycznym od 500 hPa do 1060 hPa.
- Łóżko może być przechowywane i przewożone w temperaturach od -15°C do 60°C, przy wilgotności względnej od 10% do 90% i ciśnieniu atmosferycznym od 500 hPa do 1060 hPa.



Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Czyszczenie i dezynfekcja

Łóżka nie należy polewać wodą ani korzystać z urządzenia ciśnieniowego. Łóżko należy czyścić wilgotną szmatką, przy użyciu delikatnych detergentów (mydła, szamponu). Miejsca bardziej zabrudzone można pocierać gąbką. Po wyczyszczeniu przetrzeć powierzchnię miękką szmatką nasączoną wodą w celu usunięcia pozostałości detergentu. Następnie wytrzeć do sucha. W przypadku silnych zabrudzeń do przetarcia powierzchni można zastosować roztwór alkoholu izopropylowego (75%). Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco.

Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej. Środki woskujące nie mają zastosowania i mogą być szkodliwe dla materiału.

Nie należy stosować żadnych środków ściernych, środków do pielęgnacji stali szlachetnej, polerujących czy poduszek czyszczących. Nie zaleca się używania substancji lotnych (takich jak rozpuszczalnik, benzyna) do mycia, dezynfekcji lub konserwacji, ponieważ mogą one spowodować odbarwienia lub mogą mieć wpływ na elementy urządzenia.

Łóżko należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest Państwowego Zakładu Higieny.

Utylizacja

Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.

Transport

- Łóżko może być transportowane powszechnie używanymi środkami transportu: samochodami ciężarowymi, pociągami, statkami i samolotami.
- Łóżko może być przenoszone ręcznie.
- Podczas transportu z produktem należy obchodzić się ostrożnie – nie obijać ani nie rzucać żadnej z części składowych.

