

WYPOSAŻENIE
PLACÓWEK
MEDYCZNYCH



adres: Egerton
ul. Legnicka 21
41-811 Zabrze
tel.: 32 728 10 05
faks: 32 757 91 44
e-mail: info@egerton.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WÓZEK AMBULATORYJNY

PERSOLIFE



DATA WYDANIA: 03.09.2018



Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

Wstęp

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznacznych zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji



Oznaczenie zgodności



Uwaga!

Opis produktu

Wózek ambulatoryjny Persolife zaprojektowano z myślą o jak największej wygodzie użytkownika. Jest prosty w obsłudze, intuicyjny i wyposażony w mnóstwo udogodnień oraz dodatkowych akcesoriów umożliwiających dostosowanie wózka do indywidualnych potrzeb. Liczne szuflady i pojemniki ułatwiają segregację narzędzi i materiałów. Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów jest odporny na zużywanie i uszkodzenia mechaniczne.

Zastosowanie

Wózek ambulatoryjny wykorzystywany we wszystkich oddziałach szpitalnych, szczególnie na oddziałach intensywnej terapii oraz chirurgicznych, a także w gabinetach zabiegowych. Jest przeznaczony do wspomagania zabiegów, zwłaszcza tych obciążonych dużym ryzykiem.

Dane techniczne

- Konstrukcja z odpornego tworzywa ABS z elementami z anodyzowanego aluminium.
- Błat z tworzywa ABS zabezpieczony z trzech stron burtami z tego samego materiału pełniącymi funkcję uchwytów do przemieszczania wózka.
- Wysuwany błat boczny do czynności pomocniczych.
- Szuflady o różnych wysokościach, wykonane z odpornego tworzywa ABS, wyjmowane i samodomykające się, z uchwytem na całej szerokości. Na uchwytach znajdują się kolorowe znaczniki (dostępne w dziewięciu kolorach) i ramki na etykiety zewnętrzne.
- Centralny zamek umożliwiający blokadę wszystkich szuflad lub innowacyjny system blokady centralnej z zestawem jednorazowych plastikowych plomb do szuflad opatrzonych numerami.
- Wnęka na butlę z tlenem z pasami mocującymi znajdująca się w tylnej części wózka.
- Cztery duże, podwójne, obrotowe koła, w tym dwa antystatyczne i dwa z blokadą.

Model	Persolife
Wysokość	105 cm
Szerokość	66,2 cm
Głębokość	60 cm
Średnica kół	15 cm
Liczba szuflad	5
Maksymalne obciążenie	300 kg

Wypożaenie podstawowe

- Stojak kroplówki.
- 2 wbudowane uchylne kosze na odpady.
- Zewnetrzny kosz z wyjmowanym środkiem.
- Boczna półka na butelki.
- Półka na defibrylator lub ssak.
- Deska reanimacyjna (do resuscytacji krążeniowo-oddechowej) umieszczona pod blatem wózka.
- Pojemniki do szuflad.

Wypożaenie dodatkowe


- Podkładka na blat.
- Plastikowa taca.
- Pojedynczy lub potrójny pojemnik na rękawiczki jednorazowe.
- Uchwyt na metalową miskę nerkową.
- Mocowanie na kable.
- Kosz na ostre odpady.
- Kosz na cewniki ze stali nierdzewnej.
- Podwieszany kosz ze stalowej siatki.
- Jednorazowe plastikowe plomby do szuflad opatrzone numerami.
- Podwójny kosz z podpórką.
- Boczny reling do mocowania akcesoriów.
- Listwa zasilająca.
- Pojemnik na wydzieliny.
- Metalowy uchwyt na dodatkowy kosz.

Opis montażu

Instrukcja montażu stanowi osobny dokument w postaci prostych i przejrzystych rysunków dołączany do każdego egzemplarza produktu.

Funkcje i akcesoria

Szuflady

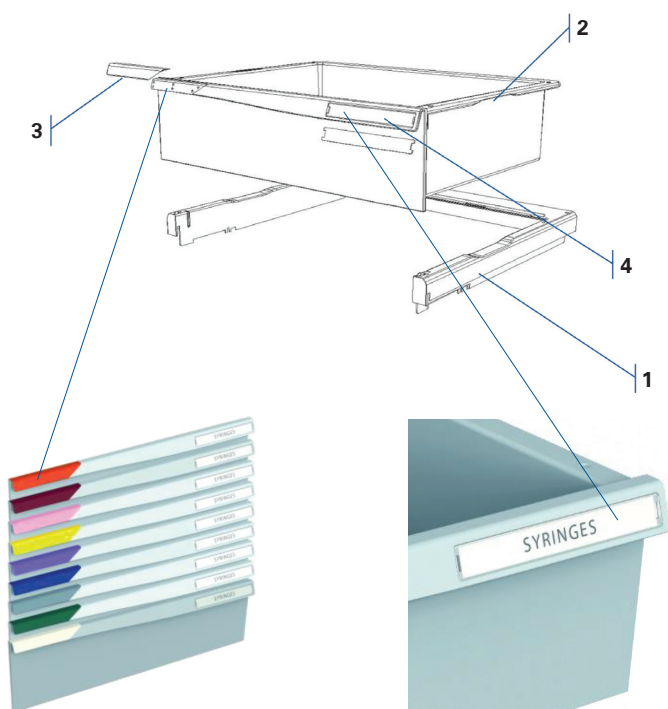


Szuflady są osadzone na prowadnicach (1). Na tych samych prowadnicach można osadzać szuflady o różnej wysokości. Aby wyjąć szufladę, należy ją unieść, trzymając za uchwyty boczne (2).

Po lewej stronie uchwytu szuflady umiejscowiony jest kolorowy znacznik (3). Kolory znaczników można wymieniać, wybierając spośród dziewięciu dostępnych. Można ich używać do znakowania rodzaju zawartości szuflad lub oznaczania oddziałów, dla których są przeznaczone znajdujące się w nich materiały.


Po prawej stronie uchwytu szuflady znajduje się ramka na etykietę zewnętrzną z przezroczystą osłoną (4). Aby wyjąć etykietę, trzeba wypchnąć tylną część ramki od spodu uchwytu, a po wymianie etykiety wcisnąć ramkę z powrotem na to samo miejsce.

Pojemniki do szuflad i etykiety wewnętrzne


Do porządkowania narzędzi i materiałów przydatne są różnego rodzaju pojemniki i podziałki do szuflad oraz etykiety wewnętrzne. Pojemniki z zawartością można wyciągać bez konieczności demontowania szuflady.

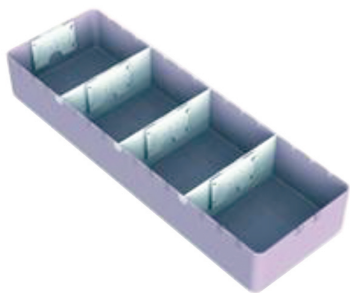

pojemnik do szuflad

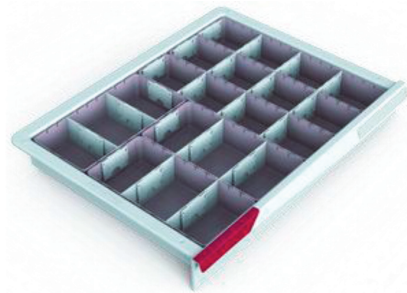

szuflada z włożonymi do niej pojemnikami

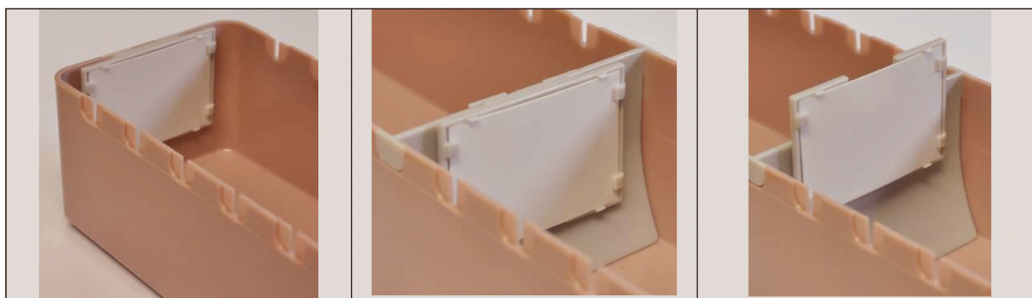

Ramki na etykiety wewnętrzne mogą być mocowane poziomo lub pionowo i na różnych wysokościach. Same etykiety są wykonane z tworzywa o ścieralnej powierzchni, na którym można pisać ścieralnym markerem lub cienkopisem.

System blokady centralnej z plombami



Jeśli deska reanimacyjna nie znajduje się z przodu wózka, rolę centralnego zamka przejmują system blokady centralnej z jednorazowymi plombami.

Koła



pedał blokady

Standardowo każdy wózek wyposażony jest w cztery obrotowe koła o średnicy 15 cm. Dwa koła są zabezpieczone blokadą uruchamianą poprzez naciśnięcie pedału stopą. Dwa pozostałe są antystatyczne.



Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych uszkodzeń. Zaleca się sprawdzenie funkcjonowania szuflad, działania centralnego zamka oraz pracy kół.
- Zabrania się użytkowania wózka w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń, gdyż grozi to wypadkiem.
- Wózek jest przeznaczony do specjalistycznych zastosowań i powinien być używany wyłącznie przez uprawniony i uprzednio przeszkolony personel.
- Podczas przewożenia wózka na blacie lub w bocznej półce nie powinny znajdować się żadne przedmioty, które mogłyby spaść, wypaść bądź w jakikolwiek sposób zagrozić bezpieczeństwu użytkowników, ani też płyny w niezamkniętych i niezabezpieczonych pojemnikach.
- Przed czynnościami wymagającymi stabilnej i nieruchomej pozycji wózka zaleca się zablokowanie przednich kół wózka.
- Nie należy otwierać więcej niż jednej szuflady naraz.
- Zabrania się wykonywania napraw na własną rękę. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy.
- Części zamienne są dostępne do 10 lat od daty produkcji. Należy stosować jedynie części przeznaczone do posiadanego modelu i typu wózka. Wszystkie wymagane informacje i parametry techniczne zamieszczono na tabliczce informacyjnej, która zwykle znajduje się w dolnej części tylnej ściany wózka.



Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Konserwacja

Dla zachowania walorów estetycznych produkt należy czyścić wilgotną szmatką, za pomocą delikatnych detergentów. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco. Dla zachowania parametrów użytkowych nie należy stosować lub składować wózka w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności (takich jak łaźnie, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu.

Środki czystości

Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej oraz materiałów ściernych. Nie należy stosować acetonu, chloru, benzyny ani jodiny. Po zakończeniu czyszczenia należy dokładnie usunąć pozostałości środka czyszczącego i wody.

Środki woskujące nie mają zastosowania i mogą być szkodliwe dla materiału.

Wózek należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest Państwowego Zakładu Higieny.

Utylizacja

Produkt wykonano z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi. Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.