

WYPOSAŻENIE
PLACÓWEK
MEDYCZNYCH



adres: Egerton
ul. Legnicka 21
41-811 Zabrze
tel.: 32 728 10 05
faks: 32 757 91 44
e-mail: info@egerton.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY Z POMPĄ P06

EGERTON VISTA 8



DATA WYDANIA: 15.03.2015



Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

Wstęp

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznacznych zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

Informacje ogólne

Znacznie łatwiej jest zapobiegać odleżynom, niż je leczyć. Sprawdzonym sposobem zapobiegania odleżynom jest regularna zmiana pozycji, dzięki czemu unika się stałego obciążenia i nacisku na jedne partie ciała, zwłaszcza na elementy układu kostnego. Inne rozwiązania to: masowanie, oklepywanie narażonych miejsc, dbałość o stan skóry, częste jej oględziny i dobre jej odżywianie.

Używanie zestawu przeciwoodleżynowego nie zwalnia opiekuna z obowiązku regularnego i dokładnego kontrolowania stanu skóry chorego.

Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji



Oznaczenie zgodności



Uwaga!



145 kg Maksymalne obciążenie (waga użytkownika)



Materiał łatwopalny



Przechowywać w suchym miejscu



Nie dotykać: niebezpieczne napięcie elektryczne!

Opis produktu

Materac zmiennociśnieniowy znacząco pomaga w zapobieganiu odleżynom dzięki funkcji regularnej zmiany ucisku poszczególnych partii ciała – komory materaca co kilka minut naprzemiennie napędniają się i opróżniają, co pozwala uniknąć stałego obciążenia newralgicznych obszarów ciała pacjenta.

Materac przeciwoodleżynowy Vista 8 służy do leczenia odleżyn do IV stopnia (według standardów organizacji European Pressure Ulcer Advisory Panel zajmującej się standardami leczenia i profilaktyki odleżyn).


Zastosowanie

Materac Vista 8 jest przeznaczony dla pacjentów przebywających w pozycji leżącej co najmniej 15 godzin na dobę oraz dla pacjentów obarczonych średnim i wysokim ryzykiem pojawienia się odleżyn.

Dane techniczne

Pompa

1. Pompa cyfrowa umożliwiająca wybór cyklu napełniania co 6, 9, 12, 25 minut.
2. Automatyczna kontrola pompowania powietrza.
3. 2 wyświetlacze LED pokazujące wagę oraz ciśnienie pacjenta.
4. Funkcja siedzenia.
5. Czujnik kontroli obciążenia.
6. Alarm niskiego ciśnienia.
7. Tryb pracy statycznej.
8. Zdalne sterowanie z pilota.
9. Blokada.

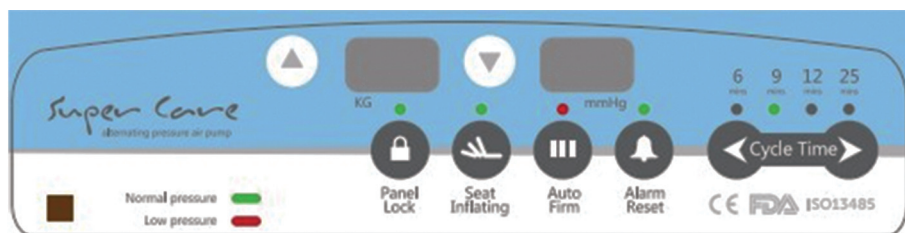

Model	Pompa APP-P06
Zasilanie	220–240 V/50–60 Hz
Prędkość napełniania	14 l/min.
Zakres regulacji ciśnienia	50–110 mmHg
Cykle napełniania	6/9/12/25 min.
Wymiary	29 x 12 x 10 cm
Waga	4 kg

Materac

Model	Vista 8
Liczba komór	20
Materiał komór	nylon TPU
Materiał pokrowca	elastyczny nylon PU
Wymiary	200 x 80 x 20 cm
Maksymalna waga pacjenta	180 kg



Wypożyczenie

Zestaw naprawczy zawierający łatkę z klejem oraz zapasową komorę.

Opis montażu

W celu przygotowania materaca do użytkowania należy zastosować się do poniższej instrukcji.

1. Rozwiń materac.
2. Rozłóż materac na łóżku.
3. Powieś pompę na ramie łóżka, używając haków.
4. Podłącz do pompy gumowe wężyki, zwracając uwagę, aby nie były skręcone ani zwinięte – musi być zapewniony swobodny przepływ powietrza.
5. Jeżeli łóżko ma barierki boczne, upewnij się, że podczas składania barierki nie będą zaczepiać o wężyki.
6. Ustaw regulator ciśnienia w pozycji MAX, następnie podłącz przewód zasilający do właściwego gniazdka elektrycznego.
7. Włącz pompę, ustawiając przełącznik w pozycji ON – świecąca się lampka w przełączniku sygnalizuje pracę urządzenia.
8. Oczekaj, aż materac wypełni się powietrzem – całkowite wypełnienie się komór materaca trwa około 2 godzin.
9. Zanim pacjent zostanie umieszczony na materacu, upewnij się, że materac jest gotowy do użycia.



Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Materac nie może być przechowywany na zewnątrz pomieszczeń ani wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (nie należy zostawiać go w samochodzie, gdy panują wysokie temperatury).
- Aby zminimalizować ryzyko porażenia elektrycznego, należy zawsze wyłączać pompę, kiedy nie jest używana.
- Przewód zasilający wymaga regularnego kontrolowania pod kątem uszkodzeń (przetarta, porowata, przecięta lub w inny sposób uszkodzona izolacja), zwłaszcza po naprężeniu lub przeciążeniu przewodu, podejrzeniu jego przecięcia, po przemieszczeniu łóżka lub pompy oraz co najmniej raz na miesiąc podczas normalnego użytkowania.
- Wężyki doprowadzające powietrze wymagają regularnego kontrolowania pod kątem uszkodzeń – uszkodzony wąż należy wymienić na nowy. Wężyki nie mogą być przyciśnięte, zagniecione, skręcone – musi być zapewniony swobodny przepływ powietrza.
- Zabrania się przesuwania produktu włączonego do prądu.
- Zabrania się sterylizowania produktu w autoklawie.
- Pompy nie wolno zanurzać w wodzie.
- Nie dopuszczać do kontaktu z alkoholami oraz substancjami olejowymi.
- Przewód zasilający powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła.

Konserwacja

Pompa

Pompę należy czyścić regularnie suchą ściereczką. Należy dbać o to, aby wlot powietrza do pompy nie został zanieczyszczony lub zapchany. Zaleca się czyszczenie filtrów powietrza co 6 miesięcy. Dla zachowania parametrów użytkowych nie należy stosować lub składować pompy w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności (takich jak łazienie, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu.

Materac

Materac powinien być regularnie czyszczony przy użyciu wody z mydłem lub łagodnych detergentów. W przypadku silnego zanieczyszczenia należy postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami szpitalnymi. Wodoodporny pokrowiec na materac może być prany ręcznie lub w pralce w temperaturze do 40°C.

Środki czystości

Do czyszczenia materaca należy używać wyłącznie detergentów oznaczonych znakiem CE informującym, że spełniają one obecne wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Nie wolno stosować środków o dużej zawartości alkoholu ani substancji olejowych.

Utylizacja

Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.