

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY

PRECISIO



DATA WYDANIA: 03.09.2018



Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

Wstęp

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznacznych zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji



Oznaczenie zgodności



Uwaga!

Opis produktu

Wózek anestetyczny Precisio zaprojektowano z myślą o jak największej wygodzie użytkownika. Jest prosty w obsłudze, intuicyjny i wyposażony w mnóstwo udogodnień oraz dodatkowych akcesoriów umożliwiających dostosowanie wózka do indywidualnych potrzeb. Liczne szuflady i pojemniki ułatwiają segregację narzędzi i materiałów. Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów jest odporny na zużywanie i uszkodzenia mechaniczne oraz łatwy do utrzymania w czystości.

Zastosowanie

Wózek anestetyczny wykorzystywany przede wszystkim na oddziałach intensywnej terapii oraz chirurgicznych. Jest przeznaczony do wspomagania zabiegów, zwłaszcza tych obciążonych dużym ryzykiem.

Dane techniczne

- Konstrukcja z odpornego tworzywa PC/ABS z elementami ze stali nierdzewnej.
- Błat z tworzywa PC/ABS odpornego na zarysowania, zabezpieczony z trzech stron burtami z tego samego materiału pełniącymi funkcję uchwytów do przemieszczania wózka.
- Wysuwany błat boczny do czynności pomocniczych może też funkcjonować jako podstawa pod laptop.
- Szuflady o różnych wysokościach, wykonane z odpornego tworzywa PC/ABS, na prowadnicach z ogranicznikiem, z uchwytem na całej szerokości. Na uchwytach znajdują się kolorowe znaczniki (dostępne w dziewięciu kolorach) i ramki na etykiety zewnętrzne.
- Nadstawka z dziewięcioma pojemnikami z przezroczystego tworzywa pozwalającymi na łatwą segregację narzędzi i materiałów oraz na wygodne z nich korzystanie.
- Centralny zamek zamykany kluczem umożliwiający blokadę wszystkich szuflad.
- System zabezpieczający szuflady przed wysuwaniem.
- Cztery duże, podwójne, obrotowe koła, w tym dwa z blokadą.

Model	Precisio
Wysokość bez nadstawki	100 cm
Wysokość z nadstawką	150 cm
Szerokość	83 cm
Głębokość	65 cm
Średnica kół	12,5 cm
Liczba szuflad	4
Maksymalne obciążenie	150 kg

Wypożyczenie podstawowe

- Nadstawka z 9 pojemnikami.
- Zamykany pojemnik z tworzywa sztucznego z wkładem do dezynfekcji.
- Metalowa miska nerkowata.
- Kosz na odpady otwierany kolaniem.
- Kosz na ostre odpady.
- Dwa relingi boczne do mocowania akcesoriów.
- Pojemniki do szuflad.

Wypożyczenie dodatkowe


- Zamek do laptopa.
- Stojak kroplówki.
- Kosz na cewniki ze stali nierdzewnej.
- Podwieszany kosz ze stalowej siatki.
- Pionowy uchwyt na akcesoria.
- Pojemnik na dokumenty.
- Kosze na odpady z pokrywką – mały i duży.
- Metalowy uchwyt na worki ze śmieciami.
- Pojemnik na igły.
- Taca ze stali nierdzewnej.
- Plastikowe tace w różnych rozmiarach.
- Pojedynczy lub potrójny pojemnik na rękawiczki jednorazowe.
- Dozownik na środki do dezynfekcji.
- Pojemnik na plastikowe kubki jednorazowe.
- Zestaw grafik.

Opis montażu

Instrukcja montażu stanowi osobny dokument w postaci prostych i przejrzystych rysunków dołączany do każdego egzemplarza produktu.

Funkcje i akcesoria

Szuflady

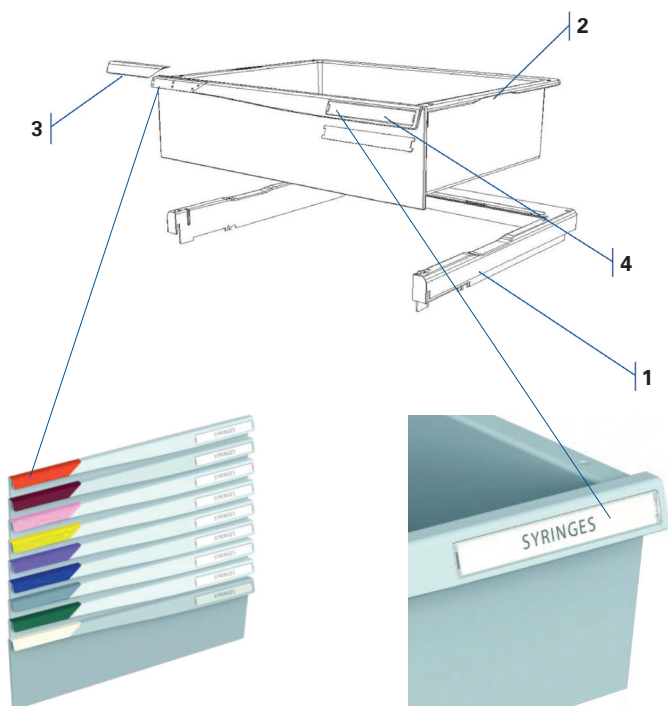


Szuflady są osadzone na prowadnicach (1). Na tych samych prowadnicach można osadzać szuflady o różnej wysokości. Aby wyjąć szufladę, należy ją unieść, trzymając za uchwyty boczne (2).

Po lewej stronie uchwytu szuflady umiejscowiony jest kolorowy znacznik (3). Kolory znaczników można wymieniać, wybierając spośród dziewięciu dostępnych. Można ich używać do znakowania rodzaju zawartości szuflad lub oznaczania oddziałów, dla których są przeznaczone znajdujące się w nich materiały.


Po prawej stronie uchwytu szuflady znajduje się ramka na etykietę zewnętrzną z przezroczystą osłoną (4). Aby wyjąć etykietę, trzeba wypchnąć tylną część ramki od spodu uchwytu, a po wymianie etykiety wcisnąć ramkę z powrotem na to samo miejsce.

Pojemniki do szuflad i etykiety wewnętrzne


Do porządkowania narzędzi i materiałów przydatne są różnego rodzaju pojemniki i podziałki do szuflad oraz etykiety wewnętrzne. Pojemniki z zawartością można wyciągać bez konieczności demontowania szuflady.

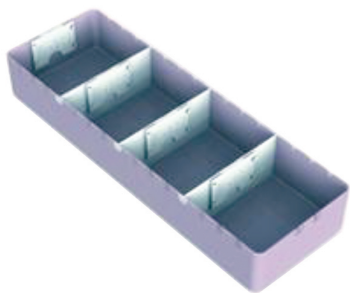

pojemnik do szuflad

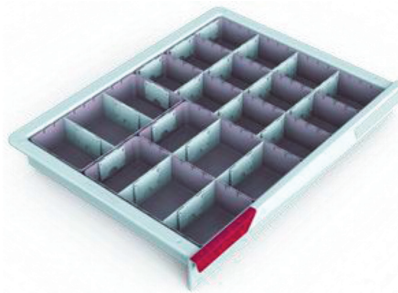

szuflada z włożonymi do niej pojemnikami

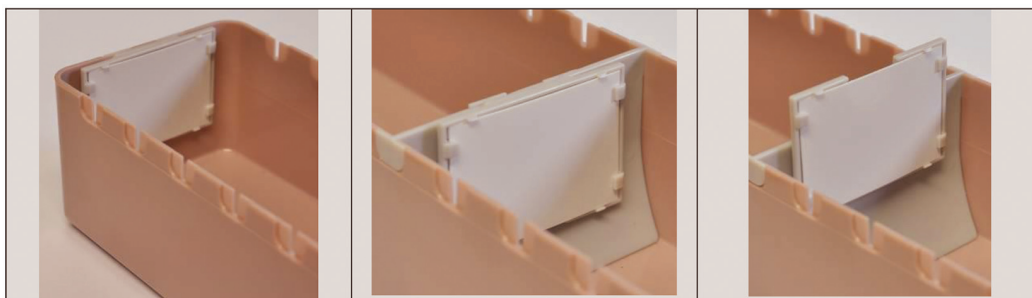

Ramki na etykiety wewnętrzne mogą być mocowane poziomo lub pionowo i na różnych wysokościach. Same etykiety są wykonane z tworzywa o ścieralnej powierzchni, na którym można pisać ścieralnym markerem lub cienkopisem.


Centralny zamek z kluczem

Wózek jest wyposażony w centralny zamek zamykany kluczem umożliwiającą blokadę wszystkich szuflad.

System zabezpieczający szuflady przed wysuwaniem

System nie pozwala na jednoczesne wysuwanie większej liczby szuflad, by nie dopuścić do wysypania się ich zawartości. Otwarta może być tylko jedna szuflada – kolejną można wysunąć dopiero po zamknięciu poprzedniej.

Koła

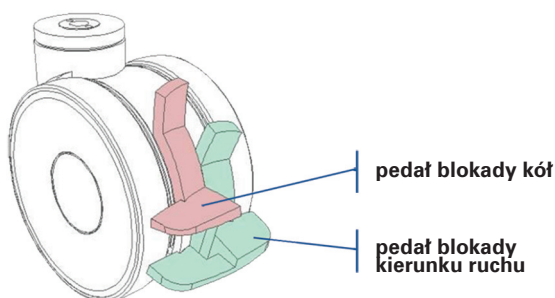

Standardowo każdy wózek wyposażony jest w cztery obrotowe koła o średnicy 12,5 cm. Dwa koła są zabezpieczone blokadą uruchamianą poprzez naciśnięcie stopą czerwonego pedału.

Niektóre wózki mają również system blokady kierunku ruchu uruchamianej przez naciśnięcie stopą zielonego pedału. Wówczas koła nie obracają się w trakcie jazdy, lecz przez cały czas są skierowane w tę samą stronę.

Obie blokady można usunąć przez uniesienie pedałów stopą od spodu.



Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych uszkodzeń. Zaleca się sprawdzenie funkcjonowania szuflad, działania centralnego zamka oraz pracy kół.
- Zabrania się użytkowania wózka w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń, gdyż grozi to wypadkiem.
- Wózek jest przeznaczony do specjalistycznych zastosowań i powinien być używany wyłącznie przez uprawniony i uprzednio przeszkolony personel.
- Podczas przewożenia wózka na blacie lub w bocznej półce nie powinny znajdować się żadne przedmioty, które mogłyby spaść, wypaść bądź w jakikolwiek sposób zagrozić bezpieczeństwu użytkowników, ani też płyny w niezamkniętych i niezabezpieczonych pojemnikach.
- Przed czynnościami wymagającymi stabilnej i nieruchomej pozycji wózka zaleca się zablokowanie hamulcami przednich kół wózka.
- Nie należy otwierać więcej niż jednej szuflady naraz.
- Zabrania się wykonywania napraw na własną rękę. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy.
- Części zamienne są dostępne do 10 lat od daty produkcji. Należy stosować jedynie części przeznaczone do posiadanego modelu i typu wózka. Wszystkie wymagane informacje i parametry techniczne zamieszczono na tabliczce informacyjnej, która zwykle znajduje się w dolnej części tylnej ściany wózka.



Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Konserwacja

Dla zachowania walorów estetycznych produkt należy czyścić wilgotną szmatką, za pomocą delikatnych detergentów. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco. Dla zachowania parametrów użytkowych nie należy stosować lub składować wózka w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności (takich jak łaźnie, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu.

Środki czystości

Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej oraz materiałów ściernych. Nie należy stosować acetonu, chloru, benzyny ani jodiny. Po zakończeniu czyszczenia należy dokładnie usunąć pozostałości środka czyszczącego i wody.

Środki woskujące nie mają zastosowania i mogą być szkodliwe dla materiału.

Wózek należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest Państwowego Zakładu Higieny.

Utylizacja

Produkt wykonano z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi. Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.

January 15th, 2018



declaration of conformity (93/42/CEE Codes)

Name of Manufacturer:

FRANCEHOPITAL SAS

Address of Manufacturer:

Zona Industriale 11
39011 LANA (Bz)
ITALY

Origin of the goods: Italy

The undersigned firm FRANCEHOPITAL SAS in the name of its President Mr. Gunnar Peroni does hereby state that **all their manufactured goods** are fully in compliance with Directive 93/42/CEE (Medical Devices - Class I). They fully respect the relative directives even if they are **not considered Medical Devices**.

FRANCEHOPITAL SAS


FRANCEHOPITAL SAS
P.E.: Zona Industriale, 11
I-39011 LANA (BZ) - ITALY
TEL. +39 0473 552 611
Vat Number IT02962870214

Gunnar Peroni
President

FRANCEHOPITAL S.A.S.

Zona Industriale, 11 / I-39011 Lana BOLZANO - ITALY
Tel. +39 0473 55 26 11 / Fax +39 0473 55 26 99 / export@francehospital.com
Italia@francehospital.com / www.francehospital.com